

Glossaire des surfaces et des préconisations de désinfection

Ce document a pour objectif de recenser l'ensemble des surfaces à désinfecter et les solutions préconisées par les organisations professionnelles d'orthoptie et de l'industrie de l'optique.

Sources :

Guide Conseils et Recommandations sur les mesures barrières en cabinet d'Orthoptie, Association Française d'Orthoptique, 28 Avril 2020

Conseils sanitaires pour Orthoptistes, Syndicat National Autonome des Orthoptistes, 28 Avril 2020

Guide de Préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités d'optique lunetterie en période de post confinement de coronavirus COVID-19, 24 avril 2020

Nettoyage et désinfection des montures, les recommandations du GIFO, 6 mai 2020

Surface	Quelle solution utiliser ?	A quelle fréquence ?
Blouse réutilisable	Lavage à 60° ou 40° avec lessive désinfectante	Tous les soirs après utilisation
Chaises / mobilier	De l'alcool à 70° modifié – De la javel diluée – Du nettoyeur respectant la norme EN14476 - Pour les sièges en tissus il est recommandé d'utiliser un système à vapeur, ou du Spray désinfectant pour tissu	2 fois par jour à minima
Crayon ou stylo personnel	Lingette désinfectante norme EN 14476	Avant et après chaque utilisation
Gants	Usage unique obligatoire, à jeter dans un sac à déchets	
Instruments	Suivre les instructions du fabricant	Avant et après chaque utilisation
Lunettes de protection	Se reporter à "Monture" et "Verres"	
Mains	eau + savon + essuie main en papier à usage unique / gel hydroalcoolique	En début de journée avant toute activité dans le cabinet Avant et après la prise en charge de chaque patiente ou de chaque changement de tâche
Masque jetable	Usage unique obligatoire, à jeter dans un sac à déchets	
Masque textile lavable	Selon les consignes du fabricant (en général lavage à 60°)	Changement toutes les 4h et lavage en fin de journée
Montures	Savon liquide pour main : nettoyage avec du savon liquide pendant 30s, rinçage à l'eau, essuyage avec essuie main à usage unique en papier non tissé. Ou désinfection avec de l'alcool isopropylique à 70°	Après chaque manipulation
Outils de Tests	Lingette désinfectante norme EN 14476	Avant et après chaque utilisation
Paroi Plexis	Lingette désinfectante norme EN 14476	Après chaque rendez-vous client
PC, clavier, souris	Lingettes désinfectantes <u>compatibles écrans</u> norme EN 14476 ou AFNOR 72180	Après chaque rendez-vous client
Poignées de porte	Lingette désinfectante norme EN 14476, De l'Alcool à 70° modifié, De la Javel diluée	Régulièrement tout au long de la journée
Prismes, Barre de Prismes	Lingette désinfectante norme EN 14476 sans Alcool, PA Ammonium quaternaire, Spray type Sanytol, Bain de pastilles Chloré (Milton)	Après chaque utilisation
Salle d'examen	De l'alcool à 70° modifié – De la javel diluée – du nettoyeur respectant la norme EN14476	Avant et après chaque utilisation
Sol	Eau de javel diluée (pas sur parquet) ou nettoyeur respectant la norme EN14476	1 fois par jour
Surblouse à usage unique	Usage unique obligatoire, à jeter dans un sac à déchets	
Tablette iPad	Lingettes nettoyantes compatibles écrans norme EN 14476 ou AFNOR 72180	Avant et après chaque utilisation
Téléphone	Lingette désinfectante norme EN 14476	Avant et après chaque utilisation
Terminal de paiement CB, TPE, douchette	Lingette désinfectante norme EN 14476	Avant et après chaque utilisation
Verres de lunettes	Savon liquide, rinçage à l'eau, essuyer avec un chiffon doux ou des lingettes pour surface optique de type Kimberly Clark Kimtech Science	Après chaque manipulation
Visière	Lingette désinfectante, intérieur et extérieur	Avant et après chaque utilisation

Document de synthèse réalisé par ZEISS / Mai 2020. Aucune responsabilité ne pourrait être engagée.

Liste des équipements de protection individuels et nettoyeurs sanitaires recommandés

Ce document a pour objectif de recenser l'ensemble des éléments sanitaires à approvisionner dans le cadre des activités d'orthoptie en période de post confinement.

Sources :

Guide Conseils et Recommandations sur les mesures barrières en cabinet d'Orthoptie, Association Française d'Orthoptique, 28 Avril 2020

Conseils sanitaires pour Orthoptistes, Syndicat National Autonome des Orthoptistes, 28 Avril 2020

Guide de Préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités d'optique lunetterie en période de post confinement de coronavirus COVID-19, 24 avril 2020
Nettoyage et désinfection des montures, les recommandations du GIFO, 6 mai 2020

Liste des équipement de protection individuels et nettoyeurs sanitaires recommandés

Alcool isopropylique à 70°

Comprimés Chlorés (Type Milton)

Désinfectant type Javel diluée à 0,5%, alcool à 70°, Produit désinfectant norme EN 14476

Essuie-mains jetables en papier non tissé

Gants jetables

Gel ou solution hydroalcoolique

Lingettes désinfectantes , norme EN 14476

Lingettes désinfectantes , norme EN 14476, compatibles Ecran

Masques de protection respiratoire

Nettoyant désinfectant, norme EN14476

Papiers pour nettoyer les verres de lunette : Type Kimtech science, Kimberly Clark

Poubelles à pédale avec couvercle

Sacs à déchets

Savon liquide pour main

Où acheter ?

Vos fournisseurs réguliers, Grandes surfaces, exemple de fournisseur identifié securimed.fr

Document de synthèse réalisé par ZEISS / Mai 2020. Aucune responsabilité ne pourrait être engagée.